



1	<p style="text-align: center;"><b>Yara Bakım Protokolü</b></p> <p>Her tedaviden önce olduğu gibi yarayı tamamen temizliyin. Ölü deri parçaları v.s</p> <p>Tedaviden sonra yaranın içinde kalabilecek kabarcıksız bir krem uygulayın. Üzerine streç film serin(bakteri bariyeri gibi düşünülebilir). Şok dalgalarını toplaması/emmesi/iletmesi için olağan ultrasound jeli filmin üzeribe uygulayınız.</p> <p>Enerji seviyesini 2 yapınız ve odak uzunluğu sonsuz olan şok başlığı kullanınız</p> <p>Yaranın her santimetre karesi için 100 şok dalgası artı 350 şok dalgası yeterlidir, fazlasına gerek yoktur. Yani, 3 santimetre karelik bir yara sadece 300 şok + 350 = 650 şok gerektirir.</p> <p>Streç filmi kaldırınız ve kirlenmiş bir cisim gibi atınız/imha ediniz. Şok Başlığını her zamanki gibi tamamen temizleyiniz.</p> <p>Yarada olabildiğince az merhem ve krem bırakın, yarayı kendi tercihinize göre örtünüz kapatınız. Şok dalgaları bütün sargı bezleriyle uyumludur ayrıca sargı bezleri ve pansuman giderlerini ortadan kaldırıyor çünkü enfeksiyonu öldürmektedir/yok etmektedir.</p>
2	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/protocols.htm">http://www.cellsonic-medical.com/protocols.htm</a>
3	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/scars.htm">http://www.cellsonic-medical.com/scars.htm</a>
4	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/feet.htm">http://www.cellsonic-medical.com/feet.htm</a>
5	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/heelspur.htm">http://www.cellsonic-medical.com/heelspur.htm</a>
6	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/tenniselbow.htm">http://www.cellsonic-medical.com/tenniselbow.htm</a>
7	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/calcifiedshoulder.htm">http://www.cellsonic-medical.com/calcifiedshoulder.htm</a>
8	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/achillodynia.htm">http://www.cellsonic-medical.com/achillodynia.htm</a>
9	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/teeth.htm">http://www.cellsonic-medical.com/teeth.htm</a>
10	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/cellsploder.htm">http://www.cellsonic-medical.com/cellsploder.htm</a>
11	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/physiotherapy.htm">http://www.cellsonic-medical.com/physiotherapy.htm</a>
12	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/synchro.htm">http://www.cellsonic-medical.com/synchro.htm</a>
13	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/varicoseveins.htm">http://www.cellsonic-medical.com/varicoseveins.htm</a>
14	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/psoriasis.htm">http://www.cellsonic-medical.com/psoriasis.htm</a>
15	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/ed.htm">http://www.cellsonic-medical.com/ed.htm</a>
16	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/animals.htm">http://www.cellsonic-medical.com/animals.htm</a>
17	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/lithosplitd.htm">http://www.cellsonic-medical.com/lithosplitd.htm</a>
18	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/digiflow_st2.htm">http://www.cellsonic-medical.com/digiflow_st2.htm</a>
19	CellSonic Shape kullanım talimatlarına göre ultrasound ve radyo frekansı sistemi kullan
20	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/cellsufflator.htm">http://www.cellsonic-medical.com/cellsufflator.htm</a>
21	Sonsuz şok başlığını ve 2. Enerji seviyesini kullanınız. Sınırları yeniden canlandırıp diyabetik ülserin patlak vermesini engellemek için düzenli olarak bütün bir bacağa ve ayağa 1000 şok uygulayınız.

22	Yara gibi tedavi edin. Dişler ve yanak arasını jel ile doldurun ve şok dalgalarını enfeksiyonun saklandığı diş etine hedeflendiriniz. Enerji Seviyesi 2.
23	Medikal CO <sub>2</sub> enfeksiyonu öldürmek için diş doğrultusunda diş etine enjekte edilebilir. Antibiyotik kullanımı gerektirmez.
24	Sıkışmış hücrelerin bölgesine doğru hedef alın. Yara bakım protokolünü takip edin
25	İnsanlarda yaralarda, eklemlerde ve tendonlarda olduğu gibi hayvanlara da uygulayınız
27	<a href="http://www.cellsonic-medical.com/surgery.htm">http://www.cellsonic-medical.com/surgery.htm</a>

Üretici :



**Apex MediTech**

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,  
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India  
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634



**Kalitesi Onaylanmış**

**ISO 13485:2003  
ISO 9001:2008**

[www.apex-meditech.com](http://www.apex-meditech.com)

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

**[uysalgoksel@gmail.com](mailto:uysalgoksel@gmail.com)**