



CellSonic Ltd Türkiye



CellSonic makinesi, hastanelerde cerrahlar tarafından kemik tedavilerinde, yaralanmalarda ve spor sakatlanmalarında kullanılmaya uygun bir litotriptördür. X-ray ve ultrason tarayıcıları ile bağlantılı olarak böbrek taşlarını kırabilir. Başlığın içindeki bir buji ve parabola ile ani bir patlama yapılır ve akustik şok dalgaları odaklandırılır. CellSonic litotriptörü küçülttü, güzellik salonlarında kullanmaya güvenli hale getirdi ve güzellik tedavisinde dünya geneline ulaşabilmek için fiyatını düşürdü.

Makine Açıklaması

Elektronikler dikey bir silindir içine yerleştirilmiştir. Şok dalgaları, esnek bir kablonun ucundaki başlığın içinde ki bir elektrik darbesi ile yapılır. Şok başlığı nihayetinde yıpranacaktır ve değiştirilmesi gerekecektir. Başlık, bağlantı kablosu ve makinenin üstüne bağlı fiş, birer birimdir. Bu başlık yenilenemez ve makinenin güvenliğini sağlamak açısından, doğru başlıkların kullanılmasından emin olmak için bir elektronik çip tanıma sistemi vardır. Makinenin hiçbir parçası tamir edilemez. Bir problem olduğunda, yerel distribütör makineyi değiştirecektir ve bu teminat 10 yıl için geçerlidir.



Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland

Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com www.cellsonic-myshape.com www.cellsonic-beauty.com
uysalgoksel@gmail.com



Prosedür

1. Tedavi edilecek alanı seçin..
2. Başlığı seçin. 5mm başlık, selülit tabakasının altındaki yağa nüfuz eder. Sonsuz şok başlığı ise pürüzsüz bir cilt bırakmak için selülitleri parçalar.
3. CellSonic jeli deriye ve biraz da başlığa uygulayın böylece şok dalgaları jelden vücuda geçebilecek. Eğer hava boşluğu olursa şok dalgaları hiç bir etki göstermeyecektir.
4. Hastayı, şok başlığını tedavi uygulanacak alana dik tutabilecek şekilde pozisyonlandırın.
5. Makineyi kullanabilmek için terapistin ilk önce teknik el kitabını okuması ve CellSonic adına yerel distribütör tarafından yapılan eğitim kursunda verilen talimatları takip etmesi gerekir.
6. Terapist makineyi açtığı anda makine saniyede 4 patlama yapar. Başlığı yumuşak bir şekilde yalnızca bir kaç milimetrede dairesel biçimde gezdirin. Başlıkla bölgeye bastırmayın. Baskıya ihtiyaç yok. Makine tüm işi yapar. Makine ayarlanmış şok sayısından sonra (genellikle 1000)
7. Diğer alanlara ilerleyin. Daha çok jel uygulayın ve tedaviye devam edin.
8. Bir tedavi seansı genellikle 1 saatte son bulacaktır. Tedavi edilen toplam alan terapistin hangi bölgeye ne kadar yoğunlaştığına bağlıdır.
9. Tedaviden sonra, kalan jeli temizleyin ve CellSonic kremden sürün. Hem jel hem de krem, yağların silindiği bölgelerde derinin daha pürüzsüz oluşabilmesi için cilt sıkılaştırıcı maddeler içerir.
10. Deriyi forma sokmak ve sıkılaştırmak için her gün CellSonic kremi kullanın.
11. Bir sonraki tedavi için diğer hafta salona tekrar dönün.
12. Unutmayın ki tedavi sadece sıkışmış yağ ve selülitleri serbest bırakır. Bunları vücuttan silmek için en iyi yol egzersizdir. Bu öneri her tedavi için geçerlidir ve herkesin hayatında temel ilke olmalıdır.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland

Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com www.cellsonic-myshape.com www.cellsonic-beauty.com
uysalgoksel@gmail.com